



SPM912 睡眠监测仪

快速入门指南

1 简介




SPM912 是一款放置在床垫底下的智能体征监测仪，可以精准监测到老人在床时的心率呼吸等体征情况，以及一整晚的睡眠状况，护工可根据分析建议决定是否进行巡视、调整饮食、甚至进行医治。

本指南将为您提供产品概述并帮助您完成初始设置

2 了解您的设备

尺寸外观

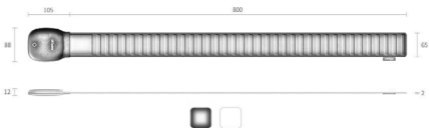

控制器: 105mmX88mmX12mm
监测带: 800mmX65mmX2mm
重量: 165g

LED 指示灯

LED 指示灯状态信息如下：

LED 状态	含义
LED 蓝灯亮	设备通电开启

按键功能

设备开启 / 关闭：旋转磁贴板

3

使用说明

使用 SPM912 加入养老监护平台步骤：

第一步：使用有权限的管理员或超管账号登录

第二步：点击菜单栏的项目配置 -> 菜单管理



第三步：找到系统设置菜单目录下的网关设备和睡眠带管理两个二级菜单 -> 分别点击编辑

▼系统设置						○	目录	
47	网关设备	系统设置	○	绿色	5	gatewayGateway	设备	编辑
48	楼宇控制	系统设置	○	绿色	7	buildingControl	设备	编辑
49	房一管理	系统设置	○	绿色	8	roomOneControl	设备	编辑
50	房二管理	系统设置	○	绿色	9	roomTwoControl	设备	编辑
54	睡眠带管理	系统设置	○	绿色	11	sleepBeltManagement	设备	编辑

第四步：将状态都选择为正常启用状态并点击确定
编辑 ×

类型 目录 菜单 按钮

* 菜单名称

* 菜单英文名称

* 上级菜单

状态 正常 ←

菜单路由

授权标识

排序号

菜单图标

第五步：刷新界面，点击菜单的系统设置即可看到网关管理和睡眠带管理两个二级菜单

第六步：点击菜单的系统设置 -> 睡眠带管理后点击录入

系统设置 > 睡眠带管理

序列号: 蓝牙mac: 编号: 是否已启用: 全部

<input type="checkbox"/>	序号	睡眠带mac	编号	
数据为空!				

转向 页 0条记录

第七步：序列号输入相应设备 Z2 开头的编号（注意：Z2 后的 - 不需要输入）；编号可自行输入；点击保存。即可在睡眠带管理界面中看到对应设备

第八步：点击菜单系统设置 -> 网关管理 -> 勾选需要加入睡眠带的网关

第九步：点击新增睡眠带，并在新增睡眠带的弹框中：①编号输入：在睡眠带管理中所编辑的编号；②EP 请输入 1 或 2 或 3 的其中一个数字；③点击保存

新增睡眠带

mac : 3C6A2CFFED00BA5

编号： * 必填

出厂号: Z20018610520

ep : * 必填

 保存

 取消

第十步：点击菜单系统设置 -> 设备管理 -> 找到对应的网关下的睡眠带并点击选中（可看到不同颜色的选中状态） -> 点击右侧绑定物业单元

第十一步：找到需要绑定的床位并点击选中（可看到不同颜色的选中状态） -> 点击确认

第十二步：点击菜单的老人监护 -> 监控面板 -> 找到对应的床位



第十三步：点击第 12 步中床位方框后会出现该老人的信息弹框，点击开启 / 关闭监控按钮



第十四步：开启监护后，在第 12 步的方框内，就可看到老人的心率和呼吸率。

5 产品参数

通讯方式	• 蓝牙 4.0
通讯距离	• 室内 10 米
工作时间	• 电池续航时间约 1 个月
重量	• 165g
尺寸	• 控制器：105x 88 x 17.5 (H) mm • 监测带：800x 65 x 2 (H) mm

6 安全事项

警告：在使用睡眠监护仪之前，请认真阅读以下所有安全注意事项。如有不遵守这些安全注意事项可能会导致火灾、电击、其他伤害或损害生

- 请避免置于潮湿、多尘、极热、极冷、强电磁辐射、靠近强电磁场源等场所。
- 使用时不可让水及任何液体流入设备。
- 避免长时间暴露在阳光或强紫外线照射下。
- 请勿将此产品摔落地下或受强烈撞击。
- 请勿自行拆卸设备，设备发生故障时请联系相应的人员。
- 未经授权，任何单位和个人不得对设备进行结构、安全、性能及设计等方面的改动。